

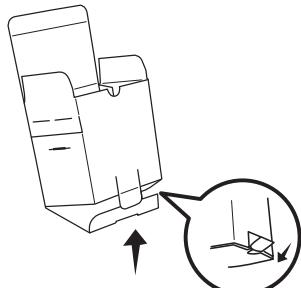


『お薬束』の組み立てかた


組み立て動画はこちら→

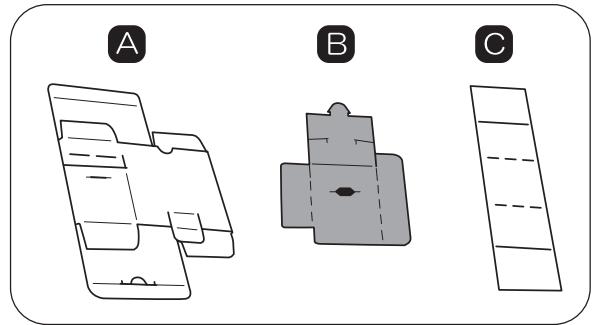

① Aの底を組む

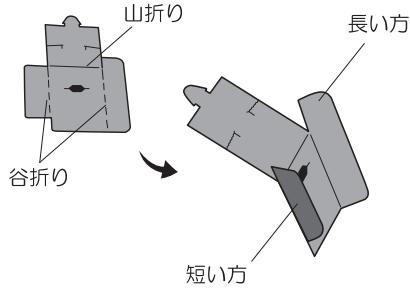


② Bの折り目をつける

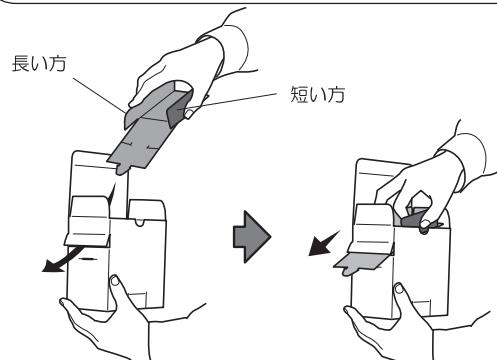


③ BをAの箱の内側から差し込む


※上から見た図

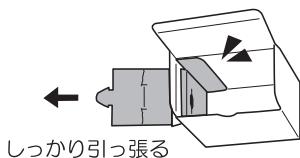

④ BをAの箱の内側に
ぴったりつける

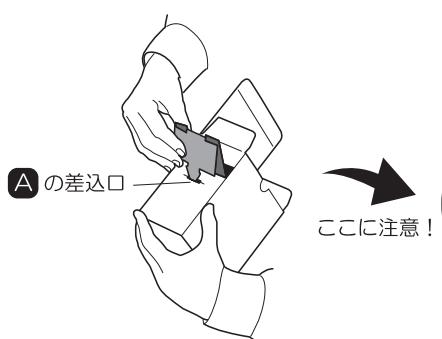

※内側から手で押さえてしっかり差し込むこと

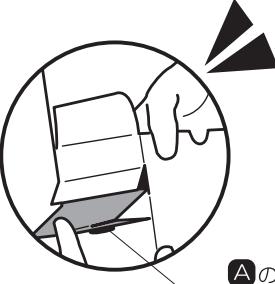


■ Aの差込口


■ Bの穴

Aの差込口とBの穴を合わせる

⑤ 外に出ている部分を折り曲げ、Aの差込口とBの穴を合わせた部分に差し込む

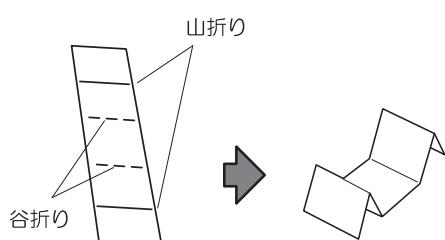


⑥ Cの折り目をつける

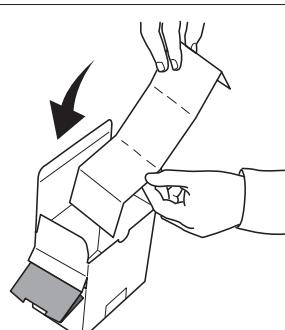


⑦ 図のように斜めから入れる

※上から見た図

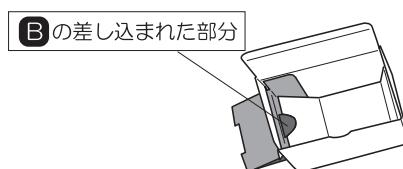


⑧ Bの差し込まれた部分より下に
Mの字になるように固定する


【薬の設置の仕方】

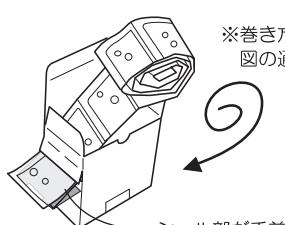

⑨ お薬を設置する

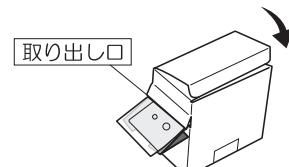


⑩ 取り出し口から薬を出した
状態でフタをする

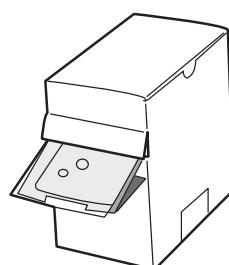

【使用方法】

一回分ずつミシン目に沿って切りとり、
ご使用ください

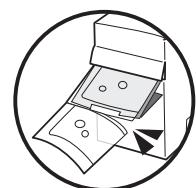

完成！！



この方向でセットすると
よりスムーズに引き出せます

裏面の「ご使用になる前に」を必ずお読み下さい。

ご使用になる前に本書を必ずお読みください

■本書は大切に保管し、必要時に取り出して読めるようにしてください。


⚠ ご注意

- これは分包化された薬専用容器です。それ以外の目的でご使用にならないでください。
- お子様の手の届かないところに保管し、保護者の方が必ずご使用し、取り扱いには十分お気をつけください。
- 使用する場合は、平らな場所に置いて使用してください。
- 容器を逆さにしたり、振り回すと薬包がとび出したり中に入り取り出しにくくなります。
- 強い衝撃を与えた場合、高い所から落下すると破損の恐れがあり危険です。ご注意ください。
- 薬包は1回分ずつご使用ください。取り出しそうた場合は、設置の仕方を参考の上容器を開けて設置し直してください。
ご不明な場合は、設置された方（薬剤師等）にお尋ねください。
- 本製品は紙製です。火気厳禁です。また水などに濡れると劣化が早くなります。ご注意ください。

よりスムーズにお使いいただくために


【スムーズに薬包が出ない場合】

巻いた薬包を下から上に引き出す形で、お薬束[®]に充填してください。また、引き出すときも、上向きに引っぱってから降ろすとスムーズになります。

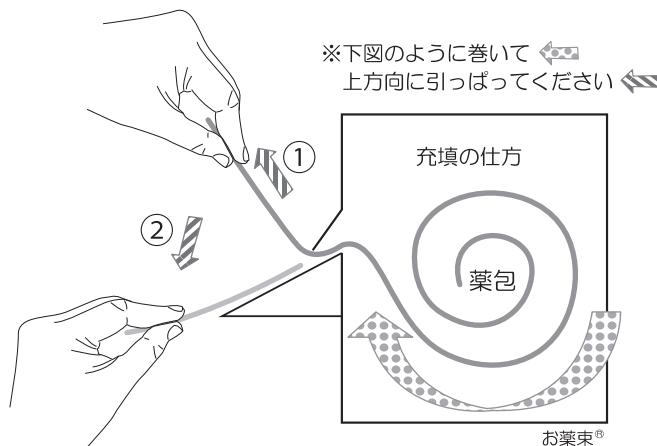


【空包が逆戻りする場合】

最後に2~3個空包を付けていただくと更に、逆戻りしにくくなります。

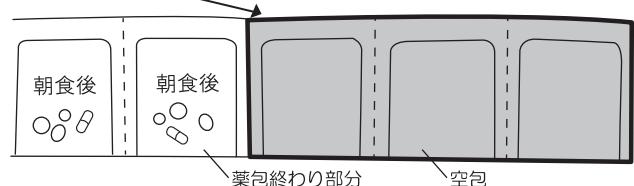


『ぬりえマスク』の取り付けかた

①両面テープ（または糊）を
Aの部分に貼ってください

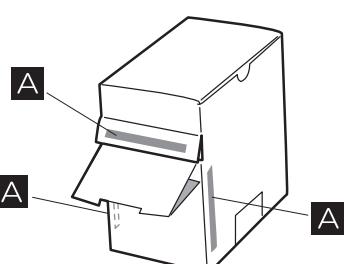

完成！！

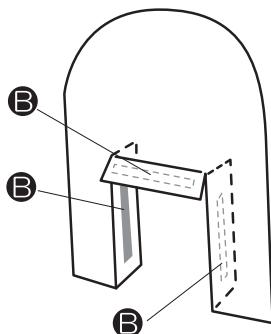

②ぬりえマスクのBの部分を
矢印の方向でAの部分につけてください

